

フェザー[®] メディカル製品カタログ

替刃式剃毛用レザー／ディスボガード／ディスポーザブルレザー／チョッキン／バンデージスニップ／パラダ製品各種



替刃式剃毛用レザー 耐久性・耐薬品性に優れたハイグレードレザー

分解・組み立てがワンタッチのバネ式ですので、替刃の交換、ホルダーの洗浄が簡単です。剃毛用ガードブレード、剃毛用ブレードの両替刃が装着できます。

- 添付替刃：剃毛用ガードブレード(3枚入)



消毒方法

○	煮沸消毒
○	オートクレープ処理
○	エタノール消毒
○	EOGガス滅菌処理
×	次亜塩素酸ナトリウム消毒※

※次亜塩素酸ナトリウムでの消毒は、長時間にわたるとサビ等の発生が見られる場合がありますので、避けてください。

替刃セット方法

フェザー剃毛用レザーの替刃保持機構は全てバネ式です。本体峰中央(バネ内蔵部)を指でつまみ、替刃セット部を開いてセットします。

- 上向きに行うと安全にセットできます。
- 替刃ディスペンサーからも直接セットできます。
- 替刃が正しくセットされているかを確認した上でご使用ください。

※ケガをしない様十分ご注意ください。



替刃の外し方

刃先を下に向けて本体峰中央(バネ内蔵部)を図のようにつまむと、替刃は自重で落下します。

- 刃先にヒゲかす等が付着したままですと、外しにくくなることがあります。
- ご使用済の替刃はディスペンサーの捨て刃収納部へ入れてください。



剃毛用ガードブレード

肌当たりがソフトで、安全性の高い半円形ガード付替刃です。刃が肌に強く当たらないので、耐久性にも優れています。

刃長50mm、全体厚0.35mm(刃厚0.15mm、ガード厚0.1mm) <15枚入>



※剃毛用ガードブレードは、旧フェザー剃毛用ホルダーAタイプ・Bタイプ・Gタイプでは使用できません。Rタイプ、またはNタイプでご使用ください。

剃毛用ブレード


プラチナコーティングと樹脂コーティング加工されたステンレス刃は、なめらかな剃り味と耐久性に優れています。

刃長50mm、刃厚0.254mm <10枚入>




ディスポガード

ディスポーザブルタイプの剃毛用カミソリです。ガード付ですので滑らかな剃り味と耐久性に優れています。

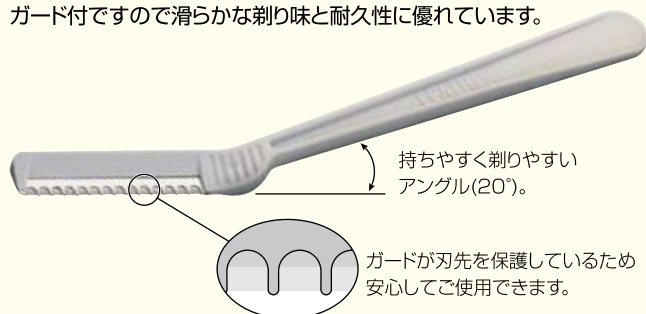

ディスポーザブルレザー

広範囲の剃毛に最適なディスポーザブルタイプの剃毛用T型両刃カミソリです。

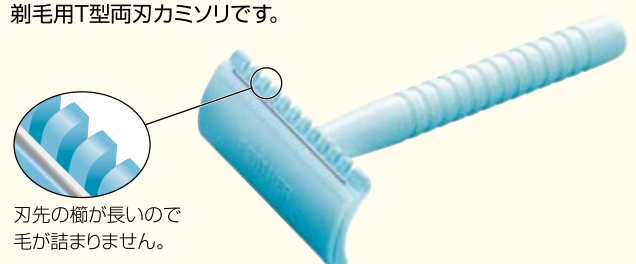

※滅菌はできません。

チョッキン コアラ/クロス (伸縮性のストラップ付)

粘着テープを切っても、刃がベタつかないフッ素コーティング加工です。刃先は丸くプラスチック製ガード付で、カットする時も安心の設計です。



フッ素コーティング加工

プラスチック製ガード

クリップ式ホルダー付で出し入れもスムーズ。ポケットもいためません。



伸縮性のストラップ



コアラピンク

コアラブルー

コアライエロー

コアラグリーン

クロスピンク

クロスブルー

クロスイエロー

クロスグリーン

バンデージスニップ

やわらかいガーゼから硬い金属板まで対象物を問わずに使用できます。グリップは耐熱性樹脂を使用していますのでオートクレーブ滅菌が可能です。



特殊ステンレス鋼製 (ピラニア刃付)

青

赤

黒

刃の先端に丸味がありますので、携帯時・使用時に危険がありません。

パラダ


使いやすさ、安全性を追求したフェザーパラダシリーズ。医療現場の身だしなみを清潔にサポートします。※滅菌はできません。

ツメキリ

本格的な携入と、フェザー独自の二段階の刃付で小気味よい切れ味をお楽しみいただけます。

最適な刃のオフセット

(噛み合わせの設定)
ツメを切るのに最適なように、上刃と下刃をわずかにずらした精密なオフセット加工をしています。

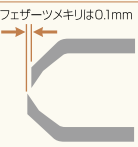

フェザーツメキリは0.1mm



Lサイズ

Sサイズ

オールメタル

ラインナップ (製品全長)

Lサイズ(102mm)

Mサイズ(82mm)

Sサイズ(66mm)

オールメタル(82mm)

ツメヤスリ

1本で2タイプの使い分けが可能な「本格目立て」を両面に採用。「三方向目立て」で形を作り、「二方向目立て」で滑らかに仕上げます。




本格三方向目立て 本格二方向目立て

爪ヤスリのグリップは亜鉛ダイカスト製。程よい重量で安定感があります。

鼻毛カッター


シャープな切れ味と耐久性向上のため、「内刃」「外刃」の双方に焼き入れ処理を施しました。

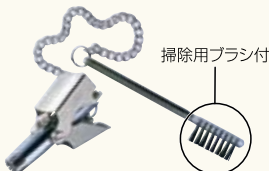

掃除用ブラシ付

耳かき

1本で2タイプの使い分けが可能です

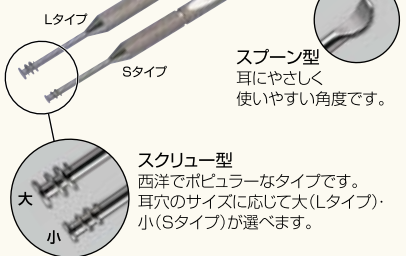

Lタイプ

Sタイプ

スプーン型
耳にやさしく使いやすい角度です。

スクリュー型

西洋でポピュラーなタイプです。耳穴のサイズに応じて大(Lタイプ)・小(Sタイプ)が選べます。

パッケージ

台紙付と箱入がございます。



台紙付

箱入