

機械器具 47 注射針及び穿刺針
管理医療機器 単回使用手動式ランセット 37466000

フェザーブラッドランセット

再使用禁止

【警告】

非常に鋭利な先端であるため、取り扱いに注意すること。


【禁忌・禁止】

- 本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。
- 再使用禁止。


【形状、構造及び原理等】

形状:

スタンダードタイプ

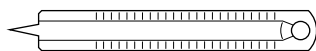

SPタイプ

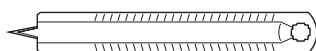

組成:ステンレス鋼

原理:本品は、鋭く尖った先端部分を持ち、皮膚表面に先端部分を突き刺し採血する為の穿刺針である。

【使用目的、効能又は効果】

血液試料を採取したり嚢や節を排膿する時に、皮膚を穿刺するために用いる小型で鋭利な先の尖った(針様の)器具をいう。本品は単回使用である。

【品目仕様】

安全性: JIS T0993-1に従い生物学的安全性を確認した製品です。

【操作方法、使用方法等】

使用するには個別包装を開封し取り出し、そのまま使用する。

※鋭利な先端です、刃先には十分ご注意ください。

【使用上の注意】

- 本品は、【使用目的、効能又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 本品は、医療有資格者以外は使用しないこと。
- 耳朶等の、組織が薄い部位に使用する場合は、穿刺する力に十分注意し、貫通させないようにすること。(組織を貫通した先端で、誤って指を穿刺した場合、血液を介した感染のおそれがある。)*
- 包装が破損している場合、包装が開封されている場合又は、製品に破損などの異常が認められる場合は使用しないこと。
- 本品は、滅菌済みである為、包装を開封したら直ぐに使用すること。
- 使用後は、感染防止に配慮して安全な方法で廃棄すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 高温・多湿、直射日光及び水濡れを避けて室温で保管する。
- 使用期限は製造日より5年。
販売単位箱及び個別包装に表示

例.  ○○○○-○○ → 使用期限○○○○年○○月を示す。

- 製造年月日はロットナンバーにより明示。

LOT 00 00 0000

製造年西暦下2桁 製造月 製造バッチ

【包装】

個別包装(1枚入):特殊加工紙
販売単位箱(200枚入):ボール紙(表面ビニール塗布加工)

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称及び住所等】

<製造販売元>フェザー安全剃刀株式会社 美濃工場
岐阜県美濃市松森600-1 TEL.0575-33-1855
<製造元>フェザー安全剃刀株式会社 本社
大阪府大阪市北区大淀南3-3-70 TEL.06-6458-1631
<お問い合わせ先>フェザー安全剃刀株式会社 東京支店
メディカル商品部 TEL.03-3864-0917